



## LINEA GUIDA PER RAFFREDDAMENTO ZIRCONIO, MONOLITI, CUT BACK, PONTI ZIRCONIO, CERAMICA

1) Per corone singole; RAFFREDDAMENTO IN CAMERA CHIUSA FINO A 800°

2) Per ponti fino a 3 gr di MASSA DI ZIRCONIO;  
RAFFREDDAMENTO IN CAMERA CHIUSA FINO A 600°

3) Per ponti o toronto oltre i 3 gr di MASSA DI ZIRCONIO;  
RAFFREDDAMENTO IN CAMERA CHIUSA FINO A 300°

4) Per toronto con grossi volumi; RAFFREDDAMENTO IN  
CAMERA CHIUSA FINO A 200°